VI 術後非洗浄式

1) システム図(図25)

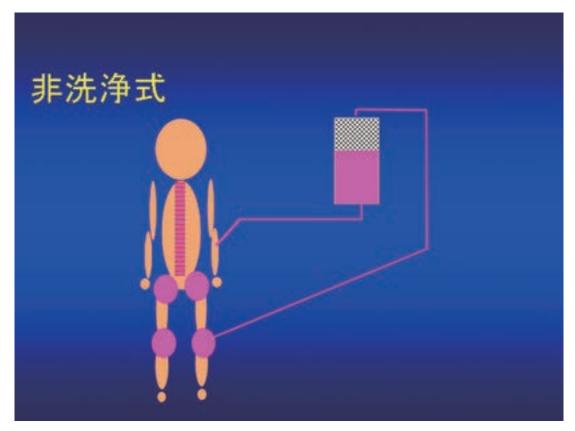


図25 システム図

2) 用意するもの

- ・自己血回収装置
- ・輸血セット
- ・ドレーンチューブ

3) 回収前の準備(図26)

- (1) 取扱説明書に従い、自己血回収装置を装着する。
- (2) 無菌的にドレーンチューブおよび術後吸引ラインの袋を開け、滅菌紙に包まれた回路を術野へ渡す。
- (3) 術後吸引ラインを術野から受け取り、無菌的にリザーバーへ接続する。
- (4) メーカー推奨に従い、リザーバーの吸引圧を設定する。




図26 回収前の準備(全体図)

4) 回収処理の手順(図27、図28、図29)

- (1) 創部が完全に縫合されたことを確認し、ドレーンチューブと術後吸引ラインを接続後、取扱説明書に従って回収処理を行う。
- (2) 当該患者氏名などを返血バッグに記載する。

ご使用の手引き<手術室>


1. 動作前チェック

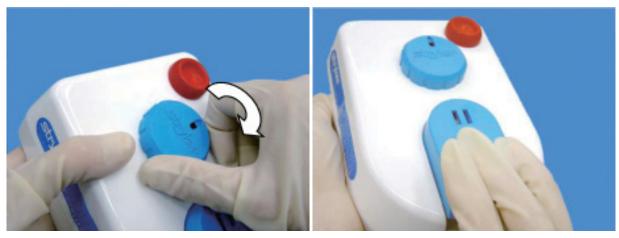

ご使用前にかならず作動チェックを行ってください。チェック後は陰圧ダイアルをOFFにし、再度レバーを押し下げ、 陰圧を解除してください

ご使用の手引き<手術室>

2. ドレーンチューブ挿入

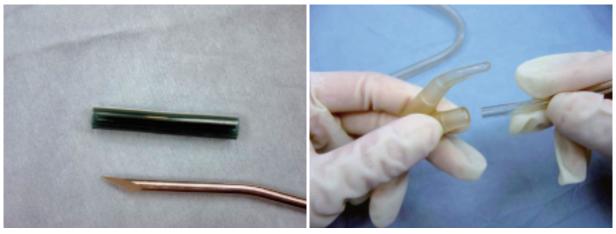

ドレーンチューブ挿入を挿入します。ドレーンチューブとYコネクタを接続します。

※駆血帯を使用した手術の場合は、接続の前に駆血帯を外した後のドレナージより、最初の約50ccを抜き取り廃棄すること。

図28 回収処理の手順2

ご使用の手引き<手術室>

3. 吸引開始



医師から指示があれば、吸引圧を設定し、吸引を開始してください。(最初の10分間は陰圧ダイアルをlow 【I】に設定し、10分後に適切な陰圧レベルに設定してください)

リザーバーは必ず垂直に保ってください。

図29 回収処理の手順3

4) 返血の手順(図30、図31、図32、図33、図34)

- (1) 回収処理が完了したら、取扱説明書の手順に従って、輸血の準備をする。
- (2) 各医療施設の標準手順に従って輸血する。

返血の手引き<回復室/病室>

1. 血液の確認




出血量を確認します。リザーバー内の血液の脂肪層が分離していること、多量の気泡がないことを確認します。

図30 返血の手順1

返血の手引き<回復室/病室>

2. 血液を返血バッグへ

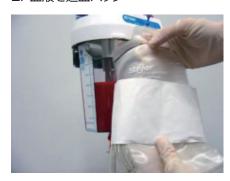





返血作業を行う時には、血液暴露への予防対策として必ず手袋を着用してください。 返血バッグへ血液を送ります。 操作中はリザーバータンクをゆすったり振ったりしないでください。

リザーバータンクには、必ず上層の70ccが残ります。

図31返血の手順2

返血の手引き<回復室/病室>

3. 40µm.マイクロアグリゲートフィルターの挿入



40 μ m.マイクロアグリゲートフィルターのスパイクを水平に差し込みます。

机の上などの場所に返血バックをおいて行ってください。 40 μ m. マイクロアグリゲートフィルターのスパイクを差し込む時は、返血バックを突き破らないように、ご注意ください。

図32 返血の手順3

返血の手引きく回復室/病室>

4. 40μm.マイクロアグリゲートフィルター への充填方法



例) ポール輸血フィルター SQ40s-KJS

血液バッグを逆さにして一方の手に持ち、もう一方の手で流量調節クランプを緩めます。この時、血液バッグ、フィルター、点滴筒が垂直に一直線になるように持ってください。

血液バッグを軽く握るようにして血液製剤をフィルターに充填する。

点滴筒が適量まで満たされたら、流量調節クランプを閉じます。

血液バッグをガートル台にかけて、フィルターセットの残りの部分を流量調節クランプを開けて充填します。

ポール輸血フィルター SQ40s添付文書新様式第1版 操作方法又は使用方法等

返血の手引き<回復室/病室>

5. 輸血スタート

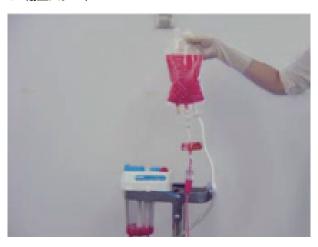


図34 返血の手順5

(図26~34は日本ストライカー株式会社提供)

5) 回収処理後の処置

- (1) 回収処理が完了したら、取扱説明書の手順に従って、使用したディスポーザブルなどを取り外す。
- (2) 取り外したディスポーザブルなどを院内の医療用廃棄物処理手順に従って廃棄する。

6) 実施上の留意点

- (1) 血液の吸引は通常使用しているドレナージの圧力で行う。
- (2) ドレーンチューブ留置中は適切にドレナージされていることを確認する。
- (3) 遊離へモグロビンが除去されないので、低ハプトグロビン血症や腎機能不全の患者では使用しない。※2